




Silikongel

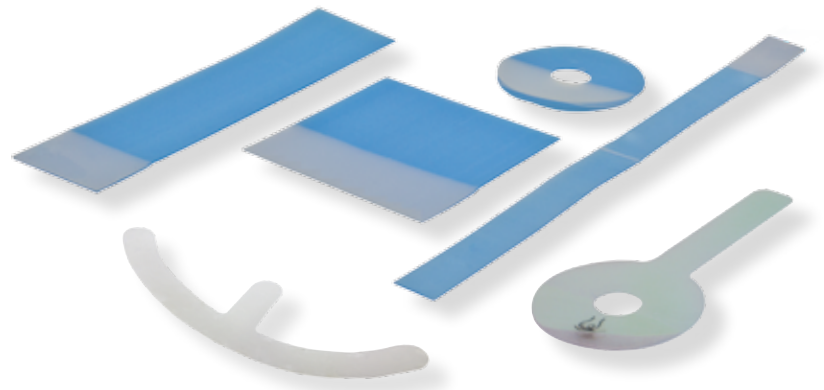

Silikongelfolien

## **POLYTECH Silikongel & Silikongelfolien**

für die Behandlung von hypertrophen  
Narben, Keloiden und Erythemen

Products made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

# POLYTECH Silikongel & Silikongelfolien, CE

## Produktbeschreibung

POLYTECH Silikongel und Silikongelfolie werden für die Therapie von hypertrophen Narben, Keloiden und Erythemen eingesetzt, die durch Verbrennungen, Operationen, Unfälle, Dermabrasion, chemisches oder Laser-Peeling entstanden sind. Darüber hinaus sind sie hervorragend für die Prävention von hypertrophen Narben, Keloiden und Erythemen geeignet.

POLYTECH Silikongel und Silikongelfolien bestehen aus Polysiloxanen und oligomeren Siloxanen. Das verwendete Silikon ist biologisch unbedenklich und entspricht in seiner Zusammensetzung z. B. der Silikonbeschichtung von Tabletten.

## Anwendungshinweise

POLYTECH Narbenpflege-Produkte stehen in Form eines Gels sowie als Gelfolien verschiedener Abmessungen zur Verfügung.

Die **Silikongelfolien** werden für die Therapie tieferer, persistenter Narben empfohlen. Sie sind wasserabweisend, luftdurchlässig und auf einer Seite selbstklebend. Je nach Position des zu behandelnden Areals ist evtl. eine zusätzliche Fixierung der Folie durch einen Verband erforderlich. Die nach Reinigung mehrfach wiederverwendbaren Folien sollten mindestens 12 Stunden täglich getragen werden. Aufgrund ihrer Transparenz sind die Folien unauffällig und komfortabel zu tragen. Durch das Gel haften die Folien hervorragend auf der Narbe.

Das Silikongel wird vor allem dort eingesetzt, wo die Anwendung der Folien erschwert ist oder vom Patienten nicht toleriert wird, wie z. B. an Gelenken und im Gesicht. In Verbindung mit Sauerstoff bildet das Gel einen dauerelastischen und luftdurchlässigen Film. Über dem getrockneten, transparenten Film kann nach Wunsch Make-up aufgetragen werden. Dies macht das Gel zu einem idealen Produkt für die Anwendung im Gesicht. Das Gel sollte zweimal täglich in einer dünnen Schicht aufgetragen werden. Durch seine verbesserte Konsistenz kann das Silikongel extrem sparsam aufgetragen werden und ist dadurch noch ergiebiger.

Für ein optimales Behandlungsergebnis ist es entscheidend, die Patienten zu einer regelmäßigen Anwendung des POLYTECH Silikongels und/oder Silikongelfolie über mehrere Wochen oder Monate zu motivieren.

## POLYTECH Silikongel & Silikongelfolien

Zur Behandlung von hypertrophen Narben, Keloiden und Erythemen. Einzeln verpackt, unsteril, CE

**Nicht auf offenen Wunden verwenden!**

Bestellnr.	Beschreibung	Dicke (mm)	Länge x Breite (mm)
<b>Silikongel</b>			
1300-015	Tube, 15 ml		
<b>Silikongelfolien</b>			
1310-010	Quadrat	0,9	100 x 100
1330-002	Rechteck	0,9	300 x 20
1320-005	Rechteck	0,9	200 x 50
1330-025	Rechteck	0,9	300 x 250
1370-070	Disk (areola)	0,9	70 x 70
1395-340	Anker (Reduktion)	0,9	95 x 340
1370-071	Schlüsselloch (Reduktion)	0,9	70 x 70 + 30 x 70



## Indikationen

- Therapie von hypertrophen Narben, Keloiden und Erythemen
- Prävention von hypertrophen Narben, Keloiden und Erythemen

## Resultate

- Abflachung des Narbengewebes
- Verbesserung der Narbenelastizität
- Verringerung von Kontrakturen
- Aufhellung von Erythemen

## Vorteile

- Einfache Applikation
- Schmerz- und risikofreie Anwendung
- Effektivität auch bei persistenten Narben
- Anwendbarkeit unter Kosmetika (Gel)
- Nachweisbar hohe Erfolgsquoten

## Wichtige Hinweise

**POLYTECH Silikongel und Silikongelfolie nicht auf offene Wunden und bei frischen Wunden erst nach Reepithelisation auftragen! Nicht bei Wundheilungsstörungen und Infektionen, sowie in Kombination mit Salben und in Augen- und Schleimhautnähe einsetzen.**

**Achtung:** Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Alzheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Deutschland

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.de